

Phonak MLxi 接收器按鈕設定



MLxi 底部的按鈕若開啟，依據搭配的發射器以及助聽輔具 DPAI 條件，可能會有不同的功能！

發射器	助聽輔具	按鈕功能關閉 (預設功能)	按鈕功能開啟
Classic FM 例：EasyLink, ZoomLink	DPAI = no	*連上助聽輔具即開啟 FM 接收功能 **沒有"FM+M"或"FM only"的音源選擇	*可利用『長按』方式開啟或關閉 MLxi **可利用『短按』方式改變音源為"FM+M"或"FM only"
Classic FM 例：EasyLink, ZoomLink	DPAI = yes	*連上助聽輔具即開啟 FM 接收功能 **需設定助聽器程式以改變音源為"FM+M"或"FM only"	*可利用『長按』方式開啟或關閉 MLxi **需設定助聽器程式以改變音源為"FM+M"或"FM only"
Dynamic FM 例：EasyLink+, ZoomLink+, Inspiro	DPAI = no	*連上助聽輔具即開啟 FM 接收功能	*可利用『長按』方式開啟或關閉 MLxi
Dynamic FM 例：EasyLink+, ZoomLink+, Inspiro	DPAI = yes	*連上助聽輔具即開啟 FM 接收功能 **需設定助聽器程式以改變音源為"FM+M"或"FM only"	*可利用『長按』方式開啟或關閉 MLxi **需設定助聽器程式以改變音源為"FM+M"或"FM only"

資料來源：

http://www.phonak.com/content/dam/phonak/b2b/C_M_tools/FM/Receivers/Brochures/MLxi-And-MLxi-Baha-Fitting-Guide.pdf